

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN COVID 19		
	No. Dokumen SPO IPK 248	No. revisi 00	Halaman 1/1
	Tanggal terbit 02 Maret 2020	Ditetapkan : Direktur 	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			
PENGERTIAN	Prosedur pengepakan dan pengiriman spesimen Covid 19		
TUJUAN	Sebagai acuan pengepakan dan pengiriman specimen COVID-19 ke Laboratorium Rujukan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Tentang : Revisi Kebijakan Pelayanan di RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 445/02522b/III/2018		
PETUGAS	Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorok, ATLM (Ahli Tehnologi Laboratorium Medik)		
PROSEDUR	1. Masukkan cryo tube berisi serum ke dalam plastik klip per Spesimen Jika menggunakan Pot maka setiap pot dapat diisi beberapa cryo tube 2. Usap Tenggorok dan nasofaring harus dikirim dalam plastik klip secara terpisah (per pasien/spesimen) 3. Spesimen sputum dimasukan dalam plastic yang terpisah 4. Seluruh spesimen dimasukkan ke dalam cool box yang berisi Ice pack yang terlebih dahulu dibekukan. Suhu pengiriman dijaga 2-8°C. 5. Ice packs sebaiknya ditempatkan pada sisi kiri dan kanan (ditambahkan juga bagian atas-bawah jika memungkinkan). 6. Harus dapat dipastikan bahwa spesimen tetap terjaga kondisi suhunya tetap dingin saat diterima di laboratorium 7. Memasukkan juga formulir kuisisioner yang telah diisi dan diberi label kedalam cool box dengan terlebih dahulu dimasukkan dalam wadah plastic 8. Cool Box ditambahkan kertas pengganjal (bisa berupa kertas koran yang diremas remas untuk menjaga stabilitas sampel). 9. Tutup Cool box dengan selotip dan beri label pada sisi kanan dan atau kiri cool box, yang ditujukan ke Laboratorium rujukan. 10. Pengiriman bisa menggunakan jasa pengiriman resmi dan tercatat atau pengiriman langsung oleh petugas.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Laboratorium Terpadu 2. Instalasi Rawat Inap II		